


THE REGENERATIVE POWER OF PLURYAL'S DENSIFIERS LINE

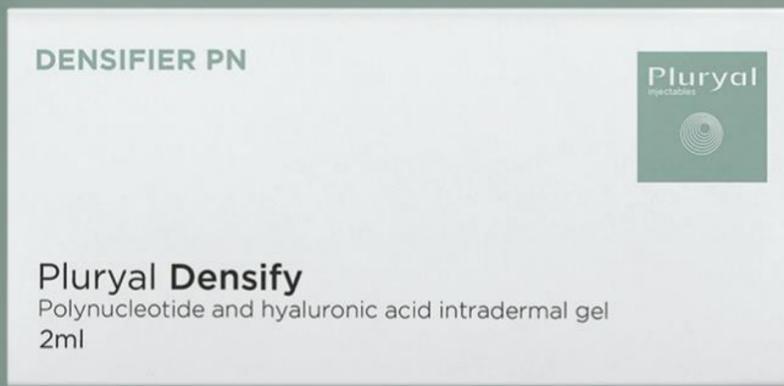

肌再生に特化した世界が認める
プルリアルデンシファイアシリーズ

YOUR MOST BEAUTIFUL AGE IS NOW



pluryal.com

PLURIAL DENSIFIER SERIES とは プルリアル デンシフィア シリーズ

ルクセンブルクのMD Skin Solutions社が開発した、CE承認を得ているフィラーシリーズです。

- ・世界で初めて目周り専用でCE承認を得たPN（ポリヌクレオチド）製剤であるPLURIAL® SILK
- ・頭皮・眉毛・ひげに対してCE承認を得たPN（ポリヌクレオチド）製剤であるPLURIAL® HAIR DENSITY
- ・PNにHA（非架橋ヒアルロン酸）とマンニトールを独自の特許技術で配合したPLURIAL® DENSIFY
- ・高分子HA・中分子HA・低分子非架橋HAをMatricyal 3D 技術で配合したPLURIAL® BIOSCULPTURE

“Skin Booster“は、肌の奥の水分量を高め、なめらかさや弾力、ハリを与えることで、肌質を改善するためのフィラーの一種ですが、PLURIAL DENSIFIER シリーズは“Skin Densifier”であり、Skin Boosterとは異なり、肌の奥の水分量を高めるだけでなく、コラーゲンの生成を促進し、肌本来の自己修復能力を補うことで、さらに高い効果を発揮し肌本来を強くすることが可能な新しい Biostimulator製剤 です。

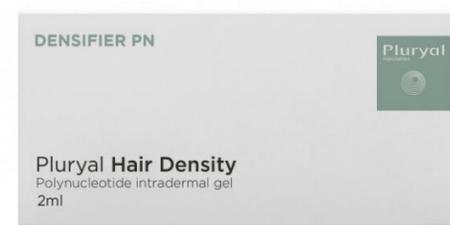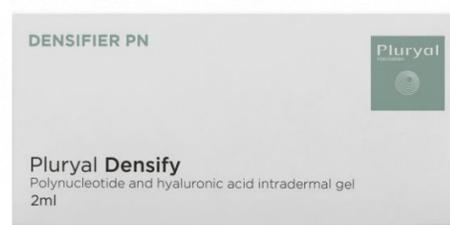

	PLURIAL BIOSCULPTURE プルリアル バイオスカルプチャー	PLURIAL SILK プルリアル シルク	PLURIAL DENSIFY プルリアル デンシファイ	PLURIAL HAIR DENSITY プルリアル ヘアデンシティ
組成	25mg/ml 架橋ヒアルロン酸 3種類のヒアルロン酸配合 ・高分子：2,000,000 Da (架橋) ・中分子：1,000,000 Da (架橋) ・低分子：500,000 Da (非架橋)	15mgポリヌクレオチド (PN)	20mg ポリヌクレオチド (PN) 20mg 非架橋ヒアルロン酸 80mg マンニトール	15mg ポリヌクレオチド (PN)
適応	・顔全体 ・手の甲 ・首	・目周り ・口周り ・ストレッチマーク ・傷跡 など、デリケートで皮膚が薄い部位	・顔全体 ・手の甲 ・首 ・デコルテ	頭皮・眉毛・ひげ 1. 休止期脱毛症 2. 毛が細い方 3. 女性のホルモン性脱毛症 4. 男性型脱毛症 5. 妊娠後（局所脱毛） 6. COVID19後脱毛症 7. 術後療法（LEDライト、PRP） 8. 自毛植毛後の術後療法
使用方法	1回1.1~2.2ml、1カ月毎に2~3回 メンテナンス：5~6カ月毎推奨 ※7Lift-Pointでの注入法や、 SILK/DENSIFYとのCombinationも可	注入法 ①1ヶ所0.02ccまで、0.5cm間隔で注入 ②リニアスレッディングで注入 1回2ml、3週間毎に3回 メンテナンス：3ヶ月毎推奨	注入法 ①1ヶ所0.05cc、1cm間隔で注入 ②カニューレで注入 1回2ml、3週間毎に3回 メンテナンス：3ヶ月毎推奨	①男性型脱毛症 1ヶ所0.02ccまで、0.5cm間隔で注入 1回2mlを使用 1~2カ月で4回、その後3~4カ月で4回注入 メンテナンス：1年毎 ②それ以外の脱毛症や密度が気になる部分 1ヶ所0.02ccまで、0.5cm間隔で注入 1回2ml、3週間毎に4回の注入 メンテナンス：必要に応じて6ヶ月後推奨
注入層	真皮深層~皮下脂肪層	真皮中層~真皮深層 口唇	真皮深層~皮下脂肪層	真皮深層
作用	皮膚のたるみ、ボリュームロス、保水性・弾力性などの肌質改善	組織再生・血管新生・抗炎症作用・傷跡修正	組織再生・血管新生・抗炎症作用・傷跡修正	毛根に栄養を与え、頭皮を強化する。毛髪の本数と直径を増加させる
技術	Matricyal 3D Technology	HPN Technology	HPN Technology	HPN Technology
シリンジ	1.1ml×2本	2.0ml×1本	2.0ml×1本	2.0ml×1本
CE承認番号	CE0373	CE0373	CE0373	CE0373
付属注射針	27G×2本 30G×2本	30G½×2本	30G½×2本	30G½×2本
CE承認番号	CE0123	CE0318	CE0318	CE0318